


フォrestaデント・ジャパン株式会社

ORTHOeasy®

*The Complete System
for Cortical Anchorage*

歯科矯正用アンカースクリュー

フォrestaデント オーソージー ピン システム

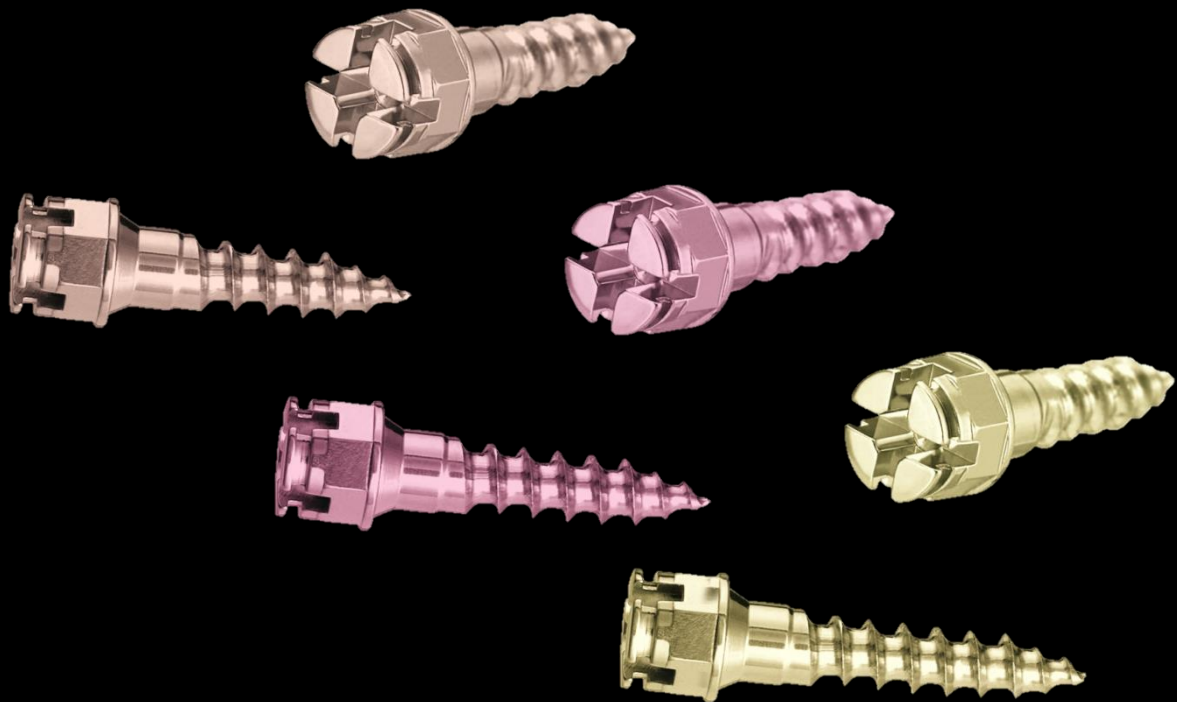

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

歯科矯正用アンカースクリュー

フォレストアデント オーソージー ピン システム

医療機器承認番号: 230008ZX00222000
販売名: オーソージー ピン
一般的名称: 歯科矯正用アンカースクリュー
高度管理医療機器


機能的なヘッド部と、色分けされた3種類の長さをもつアンカースクリューによって多くの矯正歯科治療法に対応します。



オーソージー ピン システムで使用するアンカースクリューは、シャフト(ネジ)の長さの違いを色で表しています。オーソージー ピンの頭部には矯正器具を取り付けるための十字型スロットが取り付けられています。



フォレストアデントのオーソージー ピン システム は、アンカースクリュー自体で切り込みをいれ埋入を行うタイプ(セルフドリリング型)の歯科矯正用アンカースクリューです。スクリュー先端は鋭利な切刃構造を持ち、スムーズな埋入と正確な位置決めに貢献します。

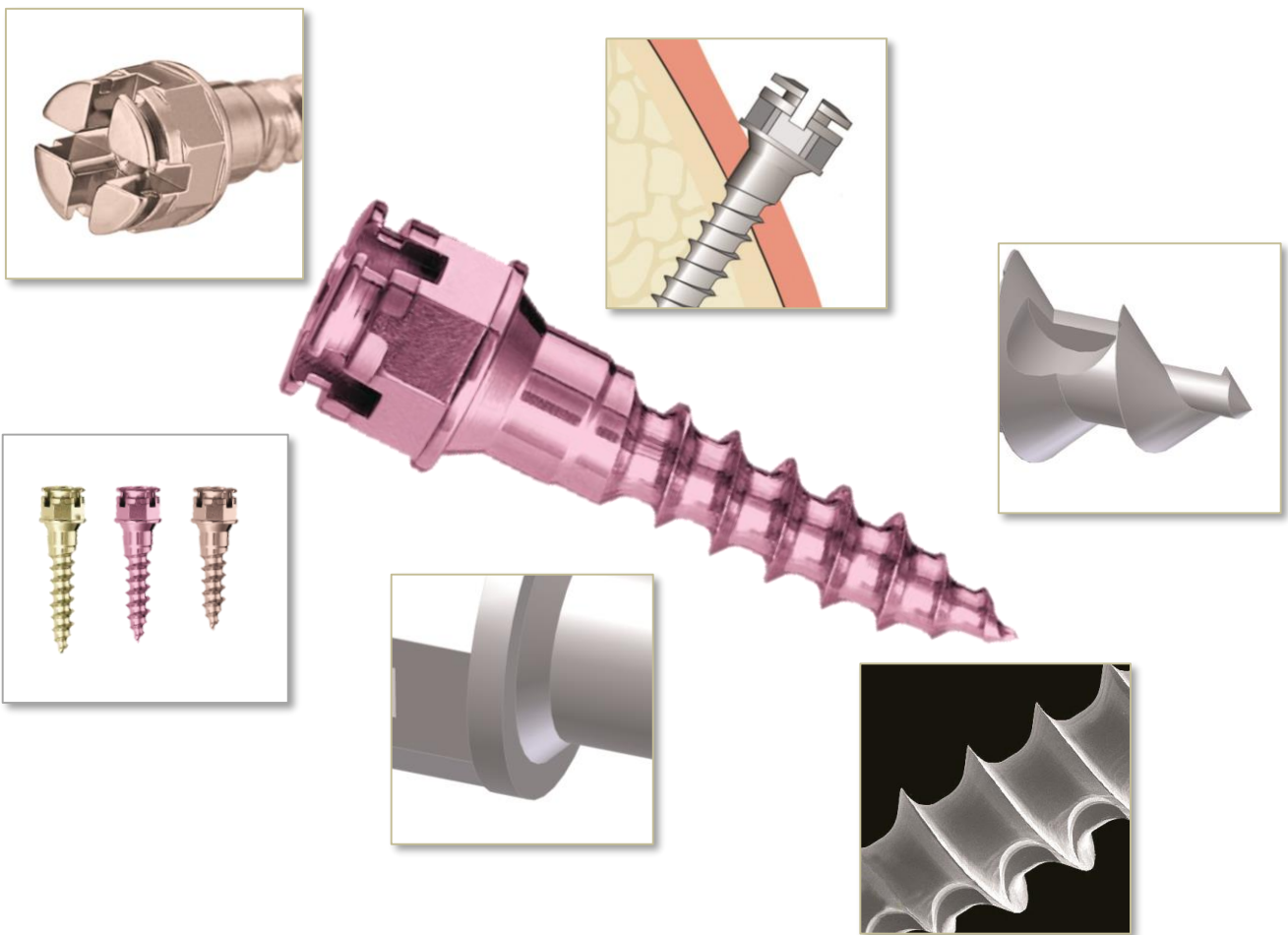


誘導孔は通常必要ありません。ただし、骨の強さおよび厚さによっては誘導孔が有益となる場合があります。骨が硬い場合、必要であればパイロットドリルで誘導孔を形成してください。ネジ自体で下穴を開け、切り込んでいくためのとてもシャープなネジ山が切られています。



オーソージー ピンを埋入後、円錐形のネック部が「ストッパー」になり歯肉を密封します。そしてヘッド(円柱部)への移行部分はヘッドと円錐形のネックよりも厚くなっています。これは歯肉がヘッド部に侵入することを防ぎます。

*- 誘導孔(パイロットドリル)は通常必要ありません。ただし、骨の強さおよび厚さによっては誘導孔が有益となる場合があります。また骨が硬い場合、必要であればパイロットドリルで誘導孔を形成します。

フォスタデント オーソージー ピンは、シャフト(ネジ)の長さ3種類、サイズの違いを色で表しています。

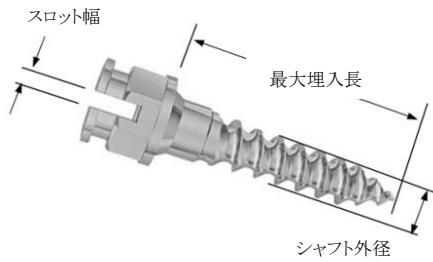

			
商品番号	1101A2306	1101A2308	1101A2310
識別色	ローズ	ピンク	ゴールド
サイズ表示	6 mm	8 mm	10 mm
最大埋入長※	8 mm	10 mm	12 mm
シャフト外径	1.71 mm		
スロット幅	0.56 mm		

※本品の種類を選択にあたっては、最大埋入長が表示サイズよりそれぞれ2mm長くなることにご留意ください。

フォスタデント オーソージー ピンを効果的にご利用いただく専用の関連製品




オーソージー ブレード(チップ)に施されたレーザーマーキングによって、ピンのスロットの位置が把握され、ブレードを外した後のピンの調整が最小で済みます。



保管、滅菌が行えるオーソージーピンシステム専用ラックは、器具に触ることなく、ブレード、ピンの着脱が容易に行えます。



* オーソージーピン、インスツルメント等は付属しません。オーソージーピン専用となります。

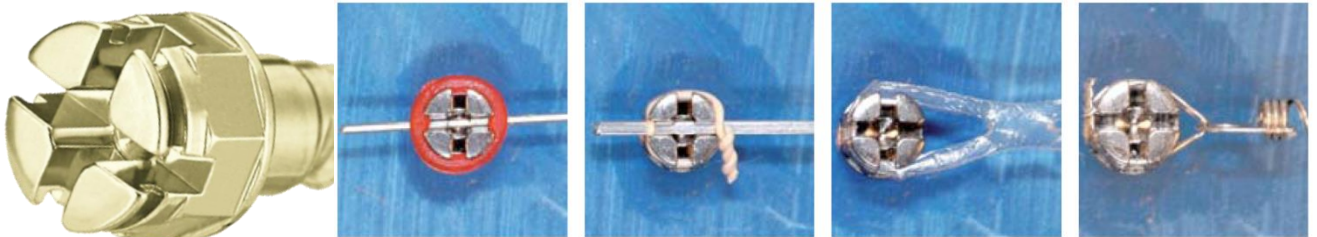機能的なヘッドデザインにより臨床において多彩なメカニクスを利用できます。



在庫の点からも、そして実用的な観点からも、一つの種類のヘッド形状を持つことが望まれます。フォスタデントのオーソージーピンのヘッド形状は1種類のみですが、その形状は、エラスティックモジュール、リゲチャーワイヤー、ラウンドワイヤー、レクトワイヤー、チェーンモジュールなど多彩な材料を利用することが可能です。

オーソージー ピン システム 付属製品

注文番号			入数
1199-0006		オーソージー ブレード 10 mm ショート 届出番号: 13B1X10233F00026 販売名: オーソージードライバー	1
1199-0015		オーソージー ブレード 45 mm ロング 届出番号: 13B1X10233F00026 販売名: オーソージードライバー	1
1199-0007		オーソージー アングル ハンドピース ブレード 5 mm 届出番号: 13B1X10233F00026 販売名: オーソージードライバー	1
1199-0008		オーソージー アングル ハンドピース ブレード 10 mm 届出番号: 13B1X10233F00026 販売名: オーソージードライバー	1
1199-0002		オーソージー ハンドル ドライバー 届出番号: 13B1X10233F00026 販売名: オーソージードライバー	1
1199-1040		オーソージー パイロットドリル 1 mm x 4 mm 届出番号: 13B1X10233F00027 販売名: オーソージーパイロットドリル	1
1199-0000		オーソージー ラック * オーソージーピン、インスツルメント等は付属しません。 オーソージーピン専用となります。	1

- オーソージー ピン システムをご使用の前には、必ず製品に添付の「添付文書」と「取扱い説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願いいたします。また、「添付文書」と「取扱い説明書」は大切に保管してください。
- オーソージー ピン システムは、常にFORESTADENT社純正の専用の器材及び付属品と合わせてご使用ください。これらの製品は互いに適合するよう開発製造されています。他社製品と合わせて使用することは不測のリスクを招きかねないためお勧めできません。
- オーソージー ピン システムは、高度管理医療機器に指定された製品です。初回ご購入時に医療施設名、ご使用者などの登録させていただきますのでご了承ください。