


# Trevisi System

Three dimensional control in the biomechanics treatment

## トレビシ システム

製品カタログ

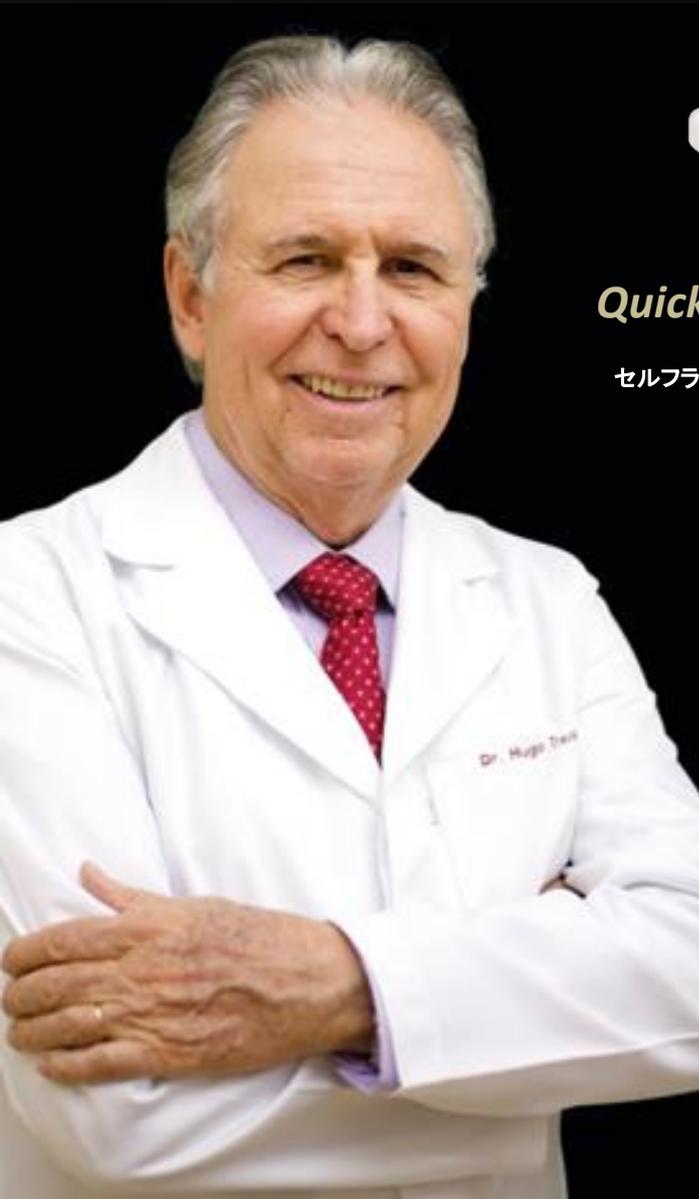

**Quicklear®III -Brackets**

クイックリアー III  
セルフライゲーション セラミック ブラケット



**Quick® -Brackets**

クイック  
セルフライゲーション メタル ブラケット

# Trevisi System

## The Trevisi Self-ligation Appliance System

*Three dimensional control in the biomechanics treatment*

### トレビシ セルフライゲーション システム

トレビシ セルフライゲーション システムは、単にブラケットのプリスクリプションだけでなく、スラディング メカニクスにおいて弱い持続的に矯正力を使用することで極力摩擦を減し、矯正治療における歯牙の動きをより効果的に向上させるアプライアンスシステムです。



このシステムは、セルフライゲーション ブラケットのデザインに大きくかかわります。開閉式のクリップを持つセルフライゲーション ブラケットは、ラウンドワイヤー、及びレクタングュラーワイヤーの小さなサイズから大きなサイズに至るまで、ワイヤーの着脱がより有利となります。

このことは、歯科矯正治療中に最適な矯正力が加えられ、より効率的に、かつ生理的な動きを促進することを実現し、そして歯列矯正治療が患者にとってより快適なものとなります。



FORESTADENT社のクイック セルフライゲーション ブラケットを利用したトレビシシステムは、ワイヤーをブラケットのスロット内でパッシブに動かすことができ、古典的な摩擦を減らし、スラディング バイオメカニクスの有効性を向上させます。適切な生物学的な強制力を加えることにより、アライニング ステージ、及びスペースクローズにおける治療時間がかなり短縮することが期待できます。

Trevisi Treatment Philosophyはブラケットに組み込まれており、歯科矯正運動中の歯の三次元的な制御を保証します。これは、より快適な笑顔で患者のより良い審美性と矯正治療の機能的閉塞を目指す矢状制御を支持する。

*Hugo Trevisi*



# Trevisi System

## Quicklear® III -Brackets

### クイックリアー III セルフライゲーション セラミック ブラケット

クイックリアー III は審美性と安定したメカニクスを可能にする美しく強いセルフライゲーション ブラケットです。

ブラケット本体内側にオフセットをつけて彫りこまれたクイックリアーIII セラミック ブラケットのベースは、その独自のデザインによって安定したリテンション(接着強度)を実現すると共に、専用のブラケット撤去用インスツルメントを利用してセラミック ブラケットを破壊することなく容易に撤去ができます。また近遠心に傾斜をつけたブラケット ベースのデザインは安全で安定したブラケット撤去を可能にします。



第3世代のクイックリアー セルフライゲーション セラミック ブラケット“クイックリアー III”は、従来品と比較してロープロファイルとなり、さらにフックの形状、より丸みを加えたブラケット デザインによって、口腔内での快適性が向上しました。

5-5 All Ceramic

スロットはインターアクティブ タイプで、ワイヤーサイズが .018" x .018" 又は、.016" x .022" まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018" x .025" (.018 スロット)、又は、.022" x .025" (.022 スロット)になると完全なアクティブな状態となり効果的なトルク コントロールが可能となります。



## Quick® -Brackets

### クイックセルフライゲーション メタル ブラケットシステム

クイック ブラケットはインターアクティブ タイプのクイック LP ブラケット、またはフルパッシブ タイプのクイック パッシブ ブラケットの2種類から選択が可能です。

#### クイック LP (ロープロファイル) セルフライゲーション メタル ブラケット


(インターアクティブ タイプ)

販売開始より第4世代となったクイック ブラケットは、以前のブラケットと比較してロープロファイル デザイン (クイック LP ブラケット)となり、特に上下顎の前歯部のブラケット(3-3)はより快適性を増しました。

クイックリアー セラミック ブラケット同様に2通りの方法でクリップを開きます。共通のインスツルメントを使用して唇側面、または歯肉側から容易にクリップを開くことができます。柔軟性と強度を併せ持つクリップは、不要な力による変形を押えます。



スロットはインターアクティブ タイプで、ワイヤーサイズが .018" x .018" 又は、.016" x .022" まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018" x .025" (.018 スロット)、又は、.022" x .025" (.022 スロット)になると完全なアクティブな状態となり、より効果的なトルク コントロールが可能となります。

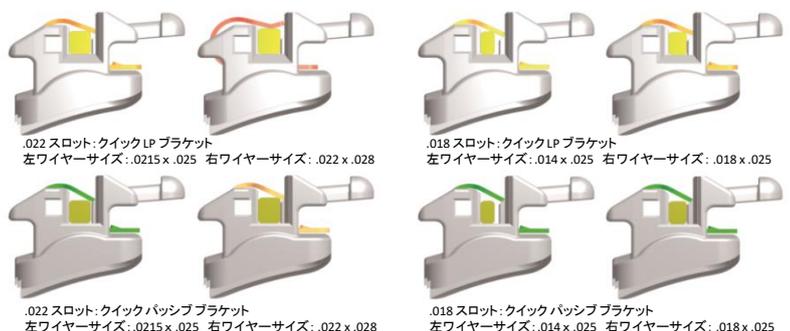

.022 スロット:クイック LP ブラケット  
左ワイヤーサイズ:.0215 x .025 右ワイヤーサイズ:.022 x .028

.018 スロット:クイック LP ブラケット  
左ワイヤーサイズ:.014 x .025 右ワイヤーサイズ:.018 x .025

.022 スロット:クイック パッシブ ブラケット  
左ワイヤーサイズ:.0215 x .025 右ワイヤーサイズ:.022 x .028

.018 スロット:クイック パッシブ ブラケット  
左ワイヤーサイズ:.014 x .025 右ワイヤーサイズ:.018 x .025


# Quick® -Brackets

インターアクティブ タイプ

クイック LP (ロープロファイル) セルフライゲーション メタル ブラケット

Trevisi System

# Trevisi System

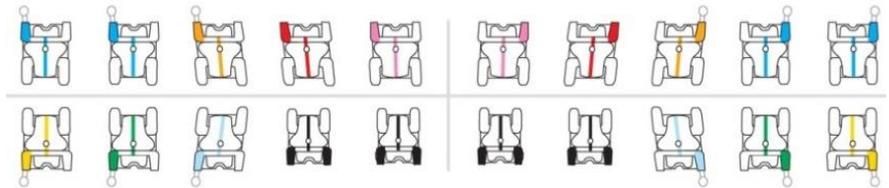

医療機器認証番号: 221AKBZX00114000  
販売名: フォレストudentクイックブラケット

1 PK (10個入)

標準価格 ¥9,000 / PK

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	-	-	733E0103	732E0103	733E0101	732E0101
2 側切歯	+10	+8	-	-	733E0203	732E0203	733E0201	732E0201
3 犬歯	0	+8	-	-	733E0323	732E0323	733E0321	732E0321
	犬歯 フック付	0	+8	-	733E0333	732E0333	733E0331	732E0331
	犬歯	-7	+8	-	733E0303	732E0303	733E0301	732E0301
	犬歯 フック付	-7	+8	-	733E0313	732E0313	733E0311	732E0311
4+5 小臼歯	-7	0	-	-	733E0403	732E0403	733E0401	732E0401
	小臼歯 フック付	-7	0	-	733E0413	732E0413	733E0411	732E0411

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-6	0	-	-	732E1203		732E1201	
3 犬歯	0	+3	-	-	733E1423	732E1423	733E1421	732E1421
	犬歯 フック付	0	+3	-	733E1433	732E1433	733E1431	732E1431
	犬歯	-6	+3	-	733E1403	732E1403	733E1401	732E1401
	犬歯 フック付	-6	+3	-	733E1413	732E1413	733E1411	732E1411
4 小臼歯	-12	+2	-	-	733E1503	732E1503	733E1501	732E1501
	小臼歯 フック付	-12	+2	-	733E1513	732E1513	733E1511	732E1511
5 小臼歯	-17	+2	-	-	733E1603	732E1603	733E1601	732E1601
	小臼歯 フック付	-17	+2	-	733E1613	732E1613	733E1611	732E1611

## クイック LP セルフライゲーション メタル ブラケット 5-5 セット

Trevisi System

標準価格 1症例セット各 ¥18,000 / Set

標準価格 5症例セット各 ¥90,000 / Set

標準価格 10症例セット各 ¥180,000 / Set

犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706E0870	706E0871	706E0872	706E0880	706E0881	706E0882
犬歯フック付	706E0873	706E0874	706E0875	706E0883	706E0884	706E0885
犬歯・小臼歯フック付	706E0876	706E0877	706E0878	706E0886	706E0887	706E0888
犬歯ブラケット トルク付	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706E0837	706E0838	706E0839	706E0852	706E0853	706E0854
犬歯フック付	706E0842	706E0843	706E0844	706E0857	706E0858	706E0859
犬歯・小臼歯フック付	706E0847	706E0848	706E0849	706E0862	706E0863	706E0864

# Quicklear® III -Brackets

クイックリアー III セルフライゲーション セラミック ブラケット

McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*



医療機器認証番号: 221AKBZX00115000  
販売名: フォレストudent クイックリアー ブラケット

クイックリアー III セラミック ブラケット 1 PK (10個入) 標準価格 ¥16,000 / PK  
クイック モラー ブラケット 1 PK (10個入) 標準価格 ¥9,000 / PK

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.1	-	C733-0103	C732-0103	C733-0101	C732-0101
2 側切歯	+10	+8	1.3	-	C733-0203	C732-0203	C733-0201	C732-0201
3 犬歯 フック付	-7	+8	0.9	-	C733-0313	C732-0313	C733-0311	C732-0311
4 小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	C733-0413	C732-0413	C733-0411	C732-0411
5 小臼歯 フック付	-7	0	1.3	-	C733-0513	C732-0513	C733-0511	C732-0511
6 大臼歯 フック付	-14	0	-	-	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711
7 大臼歯 フック付	-14	0	-	-	731-0713	730-0713	731-0711	730-0711

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-6	0	1.4	-	C732-1203		C732-1201	
3 犬歯 フック付	-6	+3	1.2	-	C733-1413	C732-1413	C733-1411	C732-1411
4 小臼歯 フック付	-12	+2	1.2	-	C733-1513	C732-1513	C733-1511	C732-1511
5 小臼歯 フック付	-17	+2	1.2	-	C733-1613	C732-1613	C733-1611	C732-1611
6 大臼歯 フック付	-20	0	-	-	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711
7 大臼歯 フック付	-20	0	-	-	731-1713	730-1713	731-1711	730-1711

## クイックリアー III ブラケット 5-5 セット McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*

下顎小臼歯はクイックメタルブラケットになります。

標準価格 1症例セット各 ¥32,000 / Set

標準価格 1症例セット各 ¥29,200 / Set

標準価格 3症例セット各 ¥96,000 / Set

標準価格 3症例セット各 ¥87,600 / Set



	クイックリアー セラミック ブラケット	クイック メタル ブラケット	Slot .018		Slot .022	
			注文番号		注文番号	
			1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
上顎	1-2 +  3-5	-	C706C0847	C706C0848	C706C0862	C706C0863
下顎	1-2 +  3-5	-				
上顎	1-2 +  3-5	4-5 小臼歯フックなし	C706-0842	C706-0843	C706-0857	C706-0858
下顎	1-2 +  3					
上顎	1-2 +  3-5	4-5 小臼歯フック付	C706-0847	C706-0848	C706-0862	C706-0863
下顎	1-2 +  3					

医療機器認証番号: 221AKBZX00120000  
販売名: フォレストudent クイック/クイックリアー ブラケット スターターキット

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

# Tulip Buccal Tubes

## McLaughlin Bennett 5.0 -

### フォレストアデント チューリップ パッカルチューブ



フォレストアデントの新しいチューリップ パッカルチューブは非常にフラットなデザインを持ち、患者さんの快適性に大きく貢献します。その名前の通り、チューブの入り口はチューリップ型に開いた形になっており、アーチワイヤーの挿入を迅速かつ容易に行うことが可能です。

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000  
販売名: フォレストアデント パッカルチューブ



標準価格 ¥10,800 / PK



1 PK (10個入)

標準価格 ¥11,800 / PK

Teeth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース		"ビッグフット"ベース	
					右	左	右	左
6   6 7   7	-14	-	10	.018	743L0744	742L0744	743B0744	742B0744
				.022	743T0742	742T0742	743B0742	742B0742
6   6	-20	-	0	.018	743L1714	742L1714	743B1714	742B1714
				.022	743T1712	742T1712	743B1712	742B1712
7   7	-10	-	0	.018	742L0724	743L0724	-	-
				.022	742T0722	743T0722	-	-

## Flat-Line buccal tubes - フォレストアデント パッカルチューブ

### McLaughlin/Bennett/Trevisi-System\*

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000  
販売名: フォレストアデント パッカルチューブ

標準価格はすべて1PK(10個入)の価格です。

1 PK (10個入)

	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	右	左	Base	右	左
6   6 コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用 標準価格 ¥9,800	728-0713	727-0713	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥12,500	728-0714	727-0714
				.022		728-0711	727-0711		728-0712	727-0712
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥13,000	-	-	-	-	-
				.022		728B0712	727B0712	-	-	
6   6 コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウエルド用 標準価格 ¥9,800	728-0727	727-0727	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥12,500	728-0728	727-0728
				.022		728-0725	727-0725		728-0726	727-0726
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥13,000	-	-	-	-	-
				.022		728B0726	727B0726	-	-	
7   7	-14	0	10	.018	ウエルド用 標準価格 ¥8,000	728-0803	727-0803	ダイレクト用 スモールベース 標準価格 ¥10,000	728-0804	727-0804
				.022		728-0801	727-0801		728-0802	727-0802
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥10,800	-	-	-	-	-
				.022		728B0802	727B0802	728L0802	727L0802	
6   6 コンバーチブル	-20	0	0	.018	ウエルド用 標準価格 ¥9,800	728-1703	727-1703	ダイレクト用 スタンダードベース 標準価格 ¥12,500	728-1704	727-1704
				.022		728-1701	727-1701		728-1702	727-1702
	-20	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥13,000	-	-	-	-	-
				.022		728B1702	727B1702	-	-	
7   7	-10	0	0	.018	ウエルド用 標準価格 ¥8,000	728-1803	727-1803	ダイレクト用 スモールベース 標準価格 ¥10,000	728-1804	727-1804
				.022		728-1801	727-1801		728-1802	727-1802
	-10	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース 標準価格 ¥10,800	-	-	-	-	-
				.022		728B1802	727B1802	728L1802	727L1802	

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.


# Arch Wires

## フォレストudent ニッケルチタン ワイヤー

医療機器認証番号:221AKBZX00033000  
販売名:フォレストudent ニッケルチタン ワイヤー



1 PK (10本入)

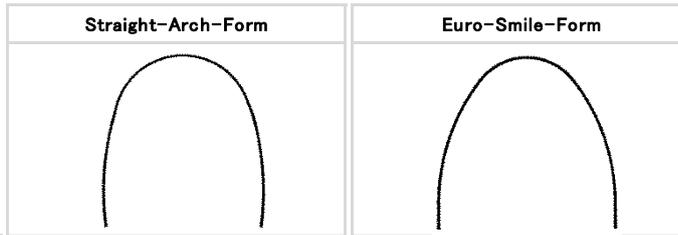

アーチワイヤー
バイオスターター ワイヤー
標準価格 ラウンド ¥6,500 / PK

注文番号	
上顎	下顎
203-0825	203-0925
203-0830	203-0930
203-0835	203-0935
203-0840	203-0940
203-0845	203-0945

注文番号	
上顎	下顎
203-1825	203-1925
203-1830	203-0930
203-1835	203-0935
203-1840	203-1940
203-1845	203-1945

プロファイル	フォース	サイズ inch
●	20 g	.010
	30 g	.012
	40 g	.014
	50 g	.016
■	70 g	.018

バイオトルク ワイヤー
標準価格 レクト/スクエア ¥9,300 / PK

注文番号	注文番号
上顎	下顎
203-2035	203-2135
203-1440	203-1540
203-2040	203-2140
203-2440	203-2540
203-2044	203-2144
203-1445	203-1545
203-2046	203-2146
203-2048	203-2148
203-1450	203-1550

注文番号	注文番号
上顎	下顎
203-1825	203-1925
203-1830	203-0930
203-1830	203-0930
203-1830	203-0930
203-1830	203-0930
203-1830	203-0930
203-1835	203-0935
203-1840	203-1940
203-1845	203-1945

プロファイル	フォース	サイズ inch
■	120 g	.014 x .025
	60 g	.016 x .016
	100 g	.016 x .022
	135 g	.016 x .025
■	140 g	.017 x .025
	90 g	.018 x .018
	150 g	.018 x .025
	170 g	.019 x .025
130 g	.020 x .020	

バイオフィニッシャー ワイヤー
標準価格 レクト/スクエア ¥9,300 / PK

注文番号	
上顎	下顎
203-2054	203-2154
203-2053	203-2153



注文番号	
上顎	下顎
203-4054	203-4154
203-4053	203-4153

プロファイル	フォース	サイズ inch
■	140 g	.017 x .025
	200 g	.021 x .025

## フォレストudent ステンレススチール アーチワイヤー

医療機器認証番号:230AKBZX00022000  
販売名:フォレストudent SS アーチワイヤー

1 PK (10本入)

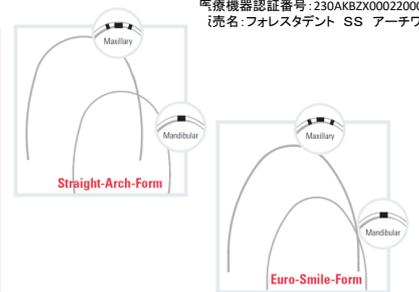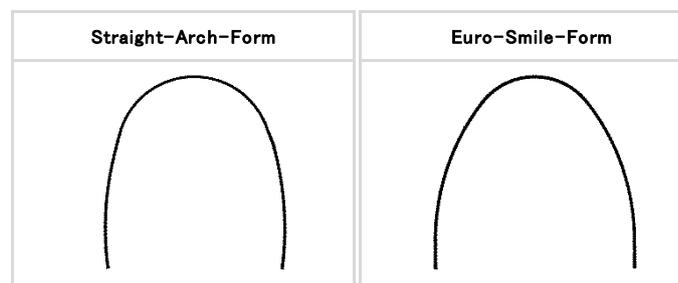

ステンレススチール アーチワイヤー
標準価格 ラウンド ¥1,800 / PK 標準価格 レクト/スクエア ¥2,000 / PK

注文番号	
上顎	下顎
202-3940	202-4040
202-3945	202-4045
202-3540	202-3640
202-3740	202-3840
202-3743	202-3843
202-3745	202-3845
202-3748	202-3848
202-3754	202-3854

注文番号	
上顎	下顎
-	-
-	-
201-3540	201-3640
201-3740	201-3840
201-3743	201-3843
-	-
201-3748	201-3848
201-3754	201-3854

プロファイル	サイズ mm	サイズ inch
●	0.41	.016
	0.46	.018
■	0.41 x 0.41	.016 x .016
	0.41 x 0.56	.016 x .022
	0.43 x 0.64	.017 x .025
	0.46 x 0.64	.018 x .025
	0.48 x 0.64	.019 x .025
	0.54 x 0.64	.021 x .025



*Three dimensional control in the biomechanics treatment*

---

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>

---