

FORESTADENT社の新しいオールセラミック セルフライゲーション ブラケット “トゥルークリアー”は、多くの矯正歯科医が望んでいた真に審美性に優れたセルフライゲーション ブラケットです。

トゥルークリアー ブラケットは、ブラケット表面はもちろん、本体内部のメカニズムにおいても全く金属材料を使用していません。歯牙表面に取り付けられたブラケットからは、半透明のセラミック素材を通して患者さんの歯牙の色調だけが透けて見えます。

もちろんトゥルークリアー ブラケットは審美性だけではなく、矯正歯科治療におけるパフォーマンスにもご満足いただけます。スロットは0.018in.と0.022in.からご選択いただけます。スロット高は0.025in.に抑えられ、トルクとローテーションコントロールを効果的に行うことが可能です。



オールセラミック セルフライゲーション ブラケット

トゥルークリアー




トゥルークリアーのセルフライゲーション機能はとてもシンプルです。スライダーを歯肉側方向にスライドさせて開き、“クリック”感によってスライダーの開閉を正確に知ることができます。本体内部にある開閉メカニズムはシンプルな構造で、また金属材料は一切使用していないため常に高い審美性を保つことができます。

ブラケット表面に見えるスライダーの幅は一見狭く見えますが、ブラケット スロット側の実際の作業側は広く、スロット幅の半分をカバーしていますので適切なローテーションコントロールが可能となります。

セラミックブラケット、特にSLブラケットは構造上金属製ブラケットよりも大きくなります。しかし、ブラケットの表面を滑らかにし、エッジ部に丸みを持たせることで、実際の装着感はそれほど損なわれることはありません。またトゥルークリアーはブラケットハイトを極力を低くデザインしていますので、装着の違和感を軽減できます。

トゥルークリアーは0.018in.スロット、0.022in.スロット、またRoth System*、McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*からご選択でき、犬歯・小臼歯はフック付、フック無をご用意しております。

トゥルークリアー ブラケットは当初上顎5-5のみの発売となります(2015年下顎発売予定)。下顎にはクイッククリアー セラミックセルフライゲーション ブラケット、クイックメタル セルフライゲーション ブラケット、グラム セラミック ブラケット、又は2D リンガル ブラケットをご使用ください。

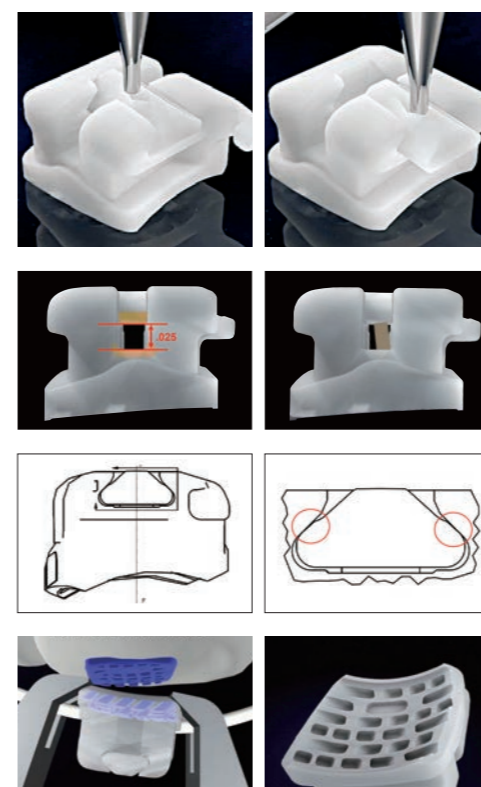

- 金属材料を使用しないオールセラミック製の本体とスライダーを使用し、優れた審美性を実現します。
- 全く金属を含まないので、金属アレルギーの患者さんにも安心して使用できます。
- スライダーはスロット内で十分な幅を確保し、ローテーション コントロールを効果的に行えます。
- スライダーは歯肉側に開くため、咀嚼や食べ物による開閉部のダメージを回避します。
- スロット高は0.025in.で、効果的なトルクコントロールを実現します。
- 半透明のセラミック素材により、変色は無く、患者さんの歯牙の色合いを引き出します。
- セルフライゲーション機能により効果的な治療と容易な取り扱いが行えます。
- 特許技術の反転フック デザインのベースを採用し、より確かなボンディングが実現します。
- スロット内の4つのコンタクトリップにより摩擦を最小限に抑えます。
- 世界中の4,000種以上の歯牙形態に基づくコンタクトベース デザインによって歯牙表面に確実にフィットさせます。
- 安全なブラケット撤去を行うため、ブラケットのベース縁に切れ込みをいれたデザインです。
- 100%ドイツ製の優れた品質管理が生み出す高品質ブラケットです。