



唇側面からのクリップの開き方

1



Cat.No. 501-0842

クイックリアーセラミックブラケット、及びクイックメタルブラケットのクリップを開けるときは必ず専用のインスツルメントを使用してください。

2



クリップを開ける前、ブラケットについた歯垢などを除去するため、プロフィーやエアブローを用いて清掃を行うことを推奨します。

3



唇側よりクリップを開くとき多くの場合このような方法をとります。

4



しかしこの取扱方法では回転運動によってクリップを破損する危険性があります。

5



写真のようにインスツルメントを持って行う方法があります。

6



親指を使ってサポートします。

7



インスツルメントの先端を歯面に垂直にクリップホールに差し入れ、歯軸に対して平行に動かしてください。



この方法ですと比較的回転運動が起りにくく、より簡単にクリップを開くことができます。

8



この方法はクイックリアーセラミックブラケット、及びクイックメタルブラケットの両方に効果があります。