

オーソ テイン

歯列矯正用咬合誘導装置製品カタログ



フォスタデント・ジャパン株式会社

FDJ 2024.02



Appliance Overview 装置の概要

ORTHOtain

オーソ テイン (Ortho-Tain®) は52年以上前、初めてプリフォームされた歯列矯正用フィニッシャーを開発し、それ以来400万個以上の装置を世界で販売しています。世界中で500以上の特許を取得しており、現在もリムーバブルアプライアンスにおける技術の革新を続けています。

すべての装置とそのテクニックは独創的であり、独自に設計され、患者さんの健康と幸福を改善することを第一に考え、Dr. Earl Bergersen、MSD、ABOによって開発されました。Dr. Earl Bergersen はノースウエスタン大学の矯正歯科講座で25年間にわたり成長と発達に関して教壇を取り、50を超える科学のおよび臨床的論文を発表しています。




Dr. Earl Bergersen、MSD、ABO

小児の睡眠、呼吸、気道の健康における先駆者の1人であり、52年以上にわたって成長と発達の研究を行い、世界中で400万人を超える子供たちの治療に関わっています。

本装置は、特定の症状の根本的な原因に対して非侵襲的な訓練、および治療を行うために用いられます。それによって子供たちの健康と福祉を改善するとともに、美しい歯並びと健康的な笑顔を生涯持ち続ける事を目的とした進歩的な治療システムです。

オーソ テインは乳歯列から永久歯に至るまで幅広い年齢層に使用することができます。習癖是正装置「ハビットコレクター」はどの年齢層にも使用することができますが、多くの場合は乳歯列期に使用され、萌出誘導装置「C、IG,Gシリーズ」と併用する使い方もあります。萌出誘導装置、および成人用矯正装置「N、X、Uシリーズ」は最終的な保定装置として使用されることが多いです。「Cシリーズ」では次の段階の装置を使用することを前提としています。

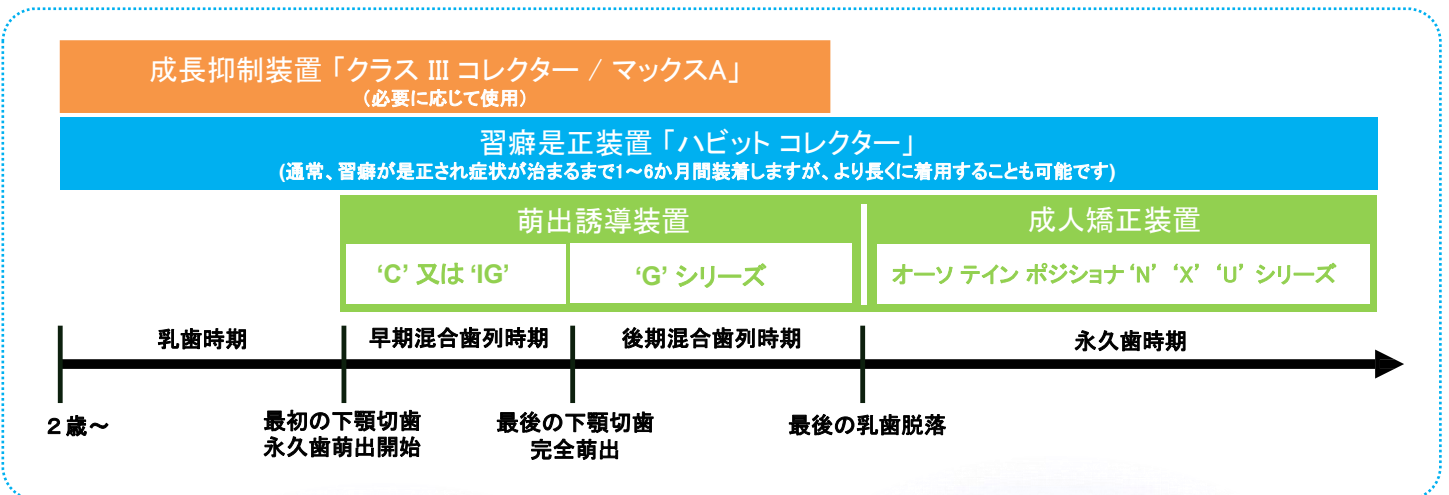




Appliance Overview 装置の選択

装製の種類	装置の名前	装置の概要
成長抑制装置 Age : 2-6 or 6-12	クラスⅢ コレクター	仮性クラスⅢを是正し、骨格性クラスⅢの悪化を最小限に抑えるように設計された装置。2種類のサイズから選択できます。 ⇒ P.4
	マックス A	乳歯または初期の混合歯列期において、前歯部の是正と臼歯部のクロスバイトの是正に効果的な装置。2種類のサイズから選択できます。 ⇒ P.4
習癖是正装置 Age : 2-4, 4-6, 6-12 or older	ハビット コレクター	口呼吸、舌突出癖およびその他の軟組織の問題などによる不適切な習癖を是正して歯列を良好に発達させるように設計された装置。2つのオプション機能を備え、4つのサイズから選択できます。 ⇒ P.6
	ハビット コレクター スレンダーライズ	Kids+は不適切な口腔習慣、アーチの不調和、口呼吸、舌突出癖などを示す5歳から8歳の子供向けに設計。成人用スレンダーライズはより小型で細身となったハビット コレクター。2つのオプション機能を備え、2つのサイズから選択できます。 ⇒ P.7
萌出誘導装置 Age : 4-6 or 6-12	ナイトガイド (“C” シリーズ)	下顎の切歯を誘導し、過蓋咬合を防ぎ、乳歯および早期の混合歯列のオーバージェットを是正するために使用される萌出誘導装置 (EGA)。多くのサイズから選択できます。 ⇒ P.8
	インテリム・G (“IG” シリーズ)	この装置は矯正歯科治療のフェーズ I とフェーズ II の間の理想的な保定装置として機能し、6歳臼歯が存在する場合にナイトガイドとして使用されます。多くのサイズから選択できます。 ⇒ P.8
	オクルーズ・オー・ガイド (“G” シリーズ)	混合歯列期のために特別に設計されており、重度のオーバージェット、オーバーバイト、叢生およびスペースを是正します。多くのサイズから選択できます。 ⇒ P.9
成人矯正装置 Age : 12 - older	オーソ テイン ポジショナー	28本すべてが永久歯の場合に使用されます。多くのサイズと3つのバリエーション (非抜歯、上顎小臼歯抜歯、小臼歯4本抜歯) から選択できます。 ⇒ P.10

オーソ テインは幅広い年齢層の様々な症例にご利用いただけます。以下の装置の選択のチャート図をご参照ください。例えば、適切なサイズ (年齢) のハビットコレクターを使用し、舌位の改善や習癖の是正を行った後に、ソケット (歯型) のある歯列矯正装置を利用して理想的な歯並びを目指します。

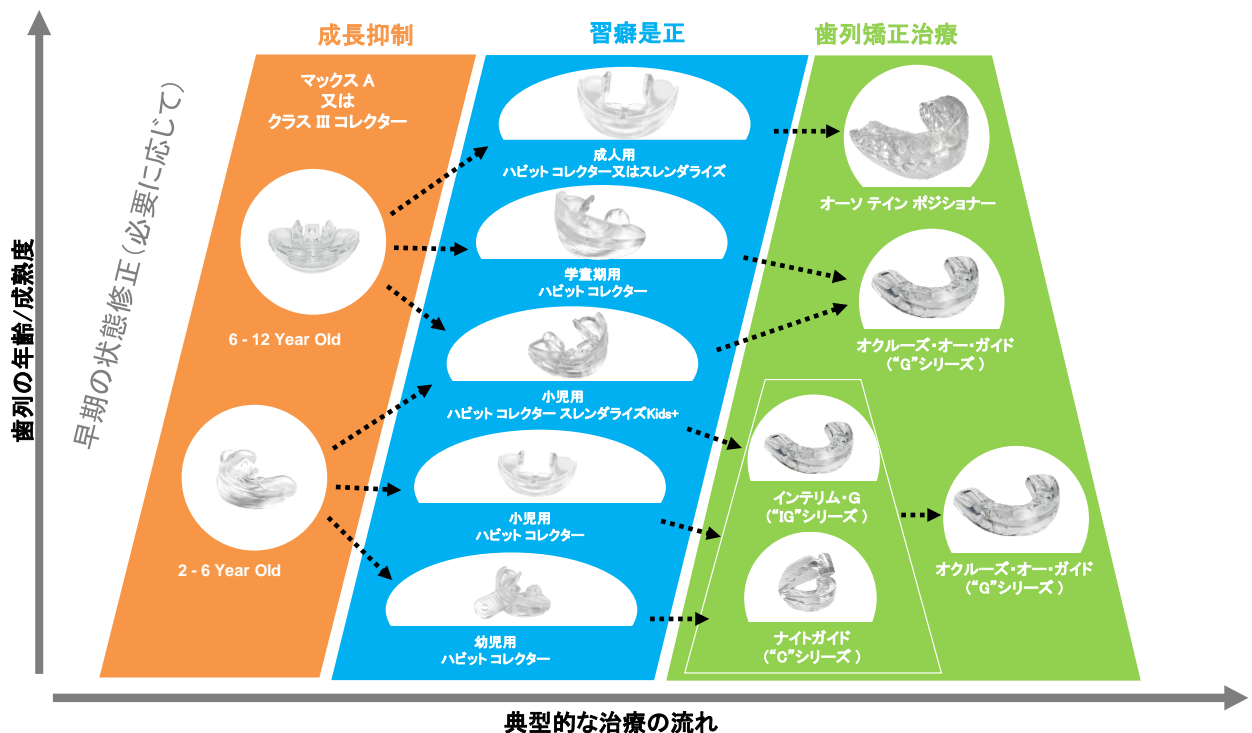





Interceptive Treatment 成長抑制用装置

クラスⅢ コレクター

- 使用目的:** 下顎前突の是正、疑似クラスⅢなどを正常状態に導き、骨格性のクラスⅢを最小限に抑えるために使用します。
- 2サイズ:** 2～6歳 (Mサイズ)、および6～12歳 (Lサイズ)。6歳臼歯が萌出している場合はLサイズを使用します。
- 着用方法:** 舌で3つのタブで押し込む運動を行い、切歯骨の前方向への発達を促します。通常は1日2時間程度着用、歯の噛みしめは必要ありません。

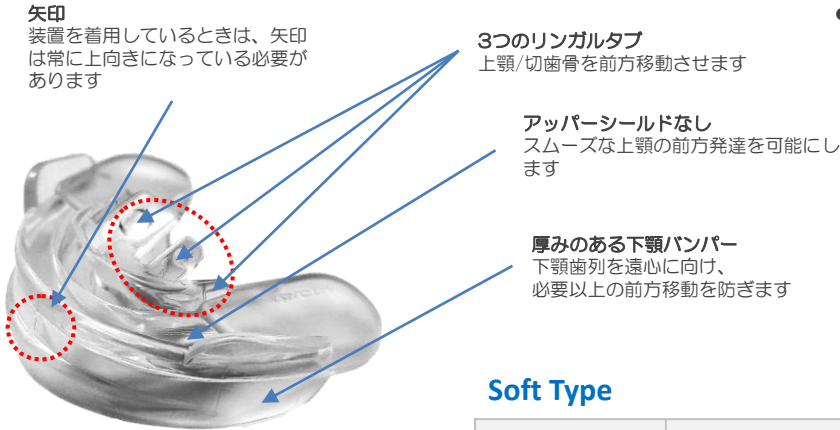

- クラスⅢ コレクターには厚い下顎バンパーがあり、下顎の歯列を遠心方向に向け、下顎骨がそれ以上前方位に移動するのを防ぎます

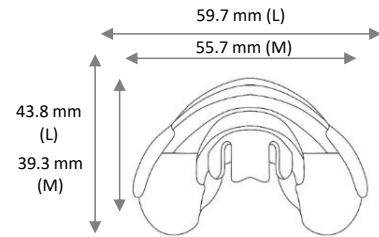


Soft Type

各 ¥7,800 / 個 (税抜)


製品番号	規格	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-CLASS III 40A	クラスⅢ コレクター M (適用年齢 2 - 6)	16.1	55.7	39.3
OT-YCLASS III 40A	クラスⅢ コレクター L (適用年齢 6 - 12)	16.2	59.7	43.8

マックスA

- 使用目的:** 後退した上下顎を前方移動させたい症例、臼歯部クロスバイトの是正。
- 2サイズ:** 2～6歳 (Mサイズ)、および6～12歳 (Lサイズ)。6歳臼歯が萌出している場合はLサイズを使用します。
- 着用方法:** 舌で3つのタブを押し込む運動を行い切歯骨の前方向への発達を促します。通常は1日2時間程度着用、歯の噛みしめは必要ありません。

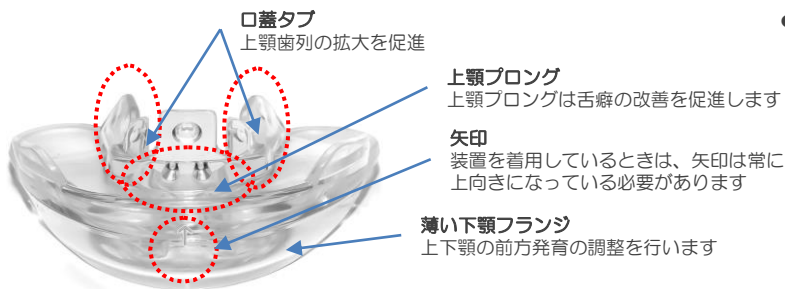

- 乳歯、または初期の混合歯列期において前歯部の是正と、臼歯部のクロスバイトに特に効果的です。

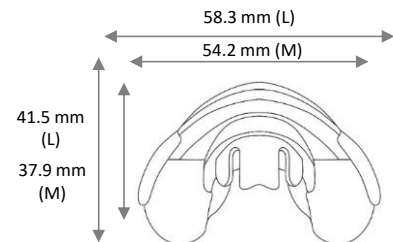

Soft Type

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

製品番号	規格	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-MAXA40A	マックスA M (適用年齢 2 - 6)	15.0	54.2	37.9
OT-YMAXA40A	マックスA L (適用年齢 6 - 12)	14.9	58.3	41.5

クラスⅢコレクター と マックスA の選択について

- 前歯部のクロスバイトが全体的 (1歯だけでない) な場合 → クラスⅢコレクター
- 中顔面が短くクロスバイトはないが上下顎ともに後退している場合 → マックスA



Habit Corrector 習癖是正用装置

ORTHOtain

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000
販売名: オーソ テイン
一般名: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

ハビット コレクター

ハビット コレクターは、口呼吸、舌突出癖、およびその他の軟組織の問題などによる不適切な習癖を是正して歯列を良好に発達させるように設計され、さらに筋機能療法機能が組み込まれた装置です。永久歯が存在するか萌出している場合は他の装置と組み合わせ、通常1~6か月間着用します。



ハビット コレクター スレンダライズ

ハビット コレクター Kids+は、不適切な口腔習慣、アーチの不調和、口呼吸、舌突出癖などがある場合、6歳臼歯が存在する、もしくは萌出する5歳から8歳の子供向けに特別に設計されました。

成人用ハビット コレクタースレンダライズは、装置に組み込まれた筋機能療法機能を介して機能と発達を促しながら、より快適性を高めるために小型で細身になりました。



Kids+ ハビット コレクター



成人用スレンダライズ ハビット コレクター

ハビットコレクター と ハビットコレクタースレンダライズの選択について

- ブラキシズムがある場合の習癖是正 → ハビットコレクター（破損に強くしっかりした造り）
- ブラキシズムがない場合の習癖是正 → ハビットコレクタースレンダライズ（軽く軽快な装着感と充実した機能）

オーソ テイン ハビットコレクター製品概要一覧

ハビット コレクター 装置のタイプ	適用年齢	フランジ高	オクルーザル プレーン厚	歯列範囲	筋機能作用	ライナーとの 併用	ブラケットとの 併用
Toddler 幼児用	2 - 4	Regular	Regular	乳歯列	○	○	○
Kids 小児用	4 - 6	Regular	Regular	乳歯列	○	○	○
Kids+ 小児用	5 - 8	Higher	Thinner	第一大臼歯	○	○	X
Youth 学童期用	7 - 11	Regular	Regular	第一大臼歯	○	○	○
Adult 成人用	12+	Regular	Regular	第二大臼歯	○	○	○
Adult Stenderized 成人用 スレンダライズ	12+	Higher	Thinner	第二大臼歯	○ - 下顎歯列が後方に落ち込むのを防ぐためわずかに長くなったリンガルタブ	○	X



Habit Corrector 習癖是正用装置

ORTHOtain


医療機器認証番号: 303AKBZX00109000
販売名: オーン ティン
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

ハビットコレクター

使用目的: 不適切な習慣（舌癖、指しゃぶり、口呼吸、異常な嚥下パターン、発音障害）軽度の口蓋拡張、歯性開口の是正などに使用します。


4サイズ: 適用年齢に応じた4サイズをご用意しています

着用方法: 日中1~2時間と睡眠時に着用。歯の噛みしめは必要ありません

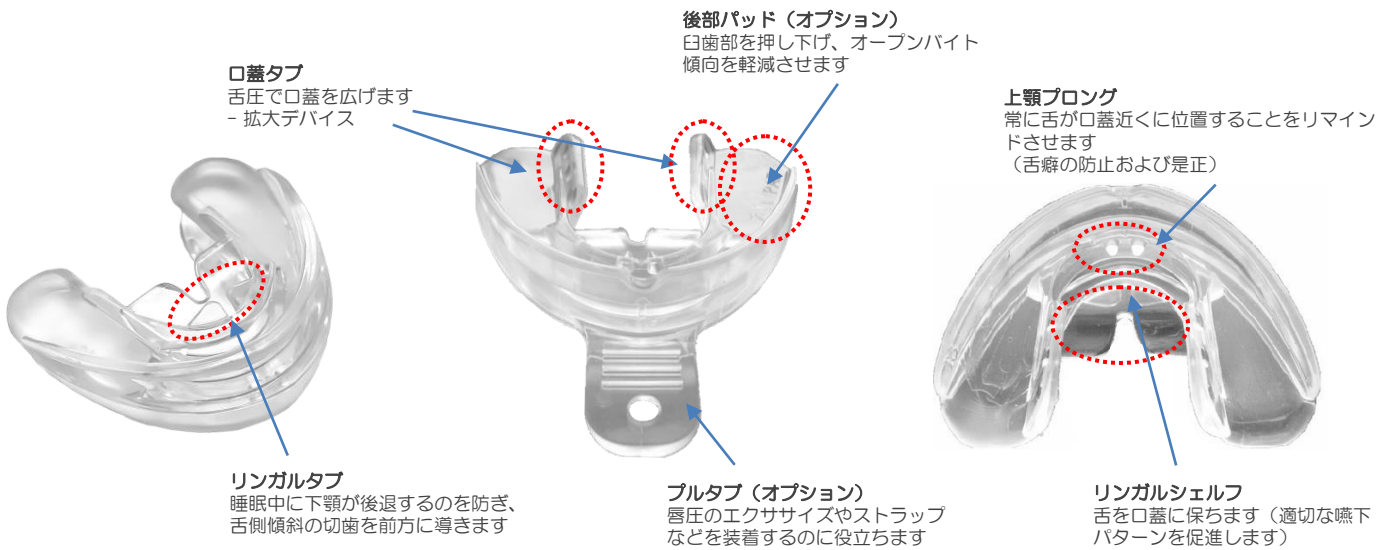

Soft Type

各 ¥7,600 / 個 (税抜)

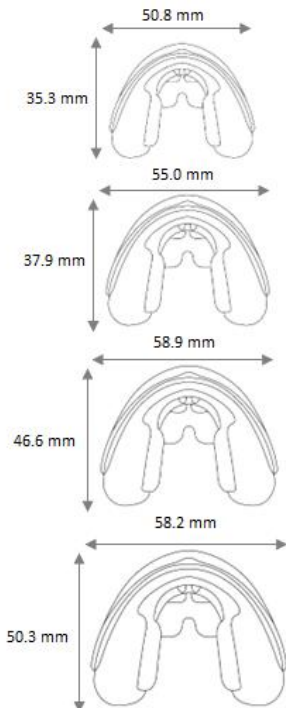

製品番号	幼児用 (適用年齢 2 - 4)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCT40AT	ハビットコレクター 幼児用	21.0	50.8	35.3
製品番号	小児用 (適用年齢 4 - 6)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCP40-B	ハビットコレクター キッズ	24.4	55.0	37.9
OT-HCCP40-BP	ハビットコレクター キッズ パッド付	24.4	55.0	37.9
OT-HCCP40-BT	ハビットコレクター キッズ プルタブ付	24.4	55.0	37.9
OT-HCCP40-BPT	ハビットコレクター キッズ パッド/プルタブ付	24.4	55.0	37.9
製品番号	学童期用 (適用年齢 7 - 11)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCY40-B	ハビットコレクター ユース	25.8	58.9	46.6
OT-HCCY40-BP	ハビットコレクター ユース パッド付	25.8	58.9	46.6
OT-HCCY40-BT	ハビットコレクター ユース プルタブ付	25.8	58.9	46.6
OT-HCCY40-BPT	ハビットコレクター ユース パッド/プルタブ付	25.8	58.9	46.6
製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCA40AN	ハビットコレクター アダルト	25.9	58.2	50.3
OT-HCCA40BP	ハビットコレクター アダルト パッド付	25.9	58.2	50.3




Habit Corrector
習癖是正用装置

ハビット コレクター スレンダーライズ

使用目的: 不適切な習慣（舌癖、指しゃぶり、口呼吸、異常な嚥下パターン、発音障害）軽度の口蓋拡張、歯性開口の是正などに使用します。

2 サイズ: 適用年齢に応じた2サイズをご用意しています

着用方法: 日中1～2時間と睡眠時に着用。歯の噛みしめは必要ありません

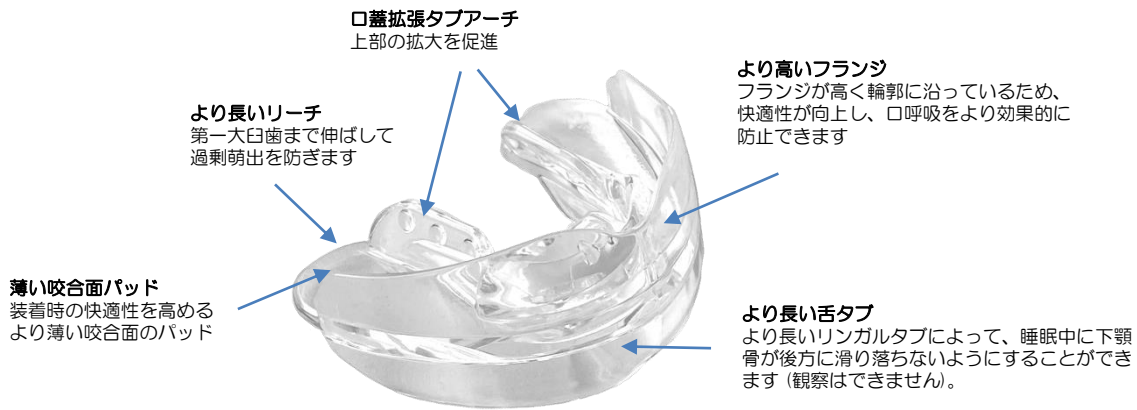

各 ¥7,600 / 個 (税抜)

Soft Type

製品番号	小児用 (適用年齢 5 - 8)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCSK40AN	ハビット コレクター キッズ+ スレンダーライズ	27.4	57.4	46.3
OT-HCCSK40AP	ハビット コレクター キッズ+ スレンダーライズパッド付	27.4	57.4	46.3
製品番号	成人用 (適用年齢 12以上)	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)
OT-HCCSA40AN	ハビット コレクター アダルト スレンダーライズ	30.6	59.8	50.4
OT-HCCSA40BP	ハビット コレクター アダルト スレンダーライズ パッド付	30.6	59.8	50.4





Eruptive Guidance Appliance 萌出誘導用装置

ORTHOtain

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000
販売名: オーン ティン
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

ナイトガイド(“C”シリーズ)、またはインテリム・G(“IG”シリーズ)、およびオクルーズ・オー・ガイド(“G”シリーズ)の装置(萌出誘導用装置)を利用したナイトガイドテクニックは、永久歯の切歯の自然な萌出を回転や変位なしに口腔内に導き、自然なアーチを促すことで未治療の理想的な歯列に導くことが示されています。

その後、装置が歯牙を所定の位置に保持している間に成人のコラーゲン繊維が発達し萌出後の安定を助けます。

ナイトガイド

(“C”シリーズ)

Hard Type



最初の永久歯(多くの場合下顎中切歯)が萌出した際に使用します。科学的にデザインされたソケットは、萌出する成人の切歯を正確に導き、クラスI咬合のために下顎を前方位に導き顔面のプロファイルを改善します。

使用目的: 歯の叢生や回転、オーバージェット、オープンバイト、過蓋咬合など

11サイズ: 5~7歳用 専用のピンク色のルーラーを使用しサイズを選択します。詳細は裏面をごらんください。

着用方法: 1日1時間の夜間および睡眠中の着用。噛みしめは不要です。

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

製品番号	規格	下顎切歯部 (乳歯または永久歯)	上顎切歯部 (乳歯または永久歯)	下顎6前歯部
OT-10C1400E	C サイズ 1	18.9 - 19.6 mm	24.9 - 26.0 mm	22.6 mm
OT-15C1400E	C サイズ 1.5	19.7 - 20.4 mm	26.1 - 27.2 mm	23.2 mm
OT-20C1400E	C サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	23.7 mm
OT-25C1400E	C サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	24.3 mm
OT-30C1400E	C サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	24.9 mm
OT-35C1400E	C サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	25.4 mm
OT-40C1400E	C サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	26.0 mm
OT-45C1400E	C サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	26.6 mm
OT-50C1400E	C サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	27.2 mm
OT-55C1400E	C サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	27.7 mm
OT-60C1400E	C サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	28.3 mm

インテリム・G

(“IG”シリーズ)

Soft Type



治療開始時点ですでに側切歯が萌出し6歳臼歯が存在する場合はナイトガイド(“C”シリーズ)を使わずインテリム・G(“IG”シリーズ)からスタートします。この装置は矯正歯科治療のフェーズIとフェーズIIの間の理想的な保定装置としても機能します。

使用目的: 歯の叢生や回転、オーバージェット、オープンバイト、過蓋咬合など。

11サイズ: 6~12歳用 専用のピンク色のルーラーを使用しサイズを選択します。詳細は裏面をごらんください。

着用方法: 1日1時間の夜間および睡眠中の着用。噛みしめは不要です。

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

製品番号	規格	下顎切歯部 (乳歯または永久歯)	上顎切歯部 (乳歯または永久歯)	上顎6前歯部 (永久歯)
OT-20I1600BC	IG サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm
OT-25I1600BC	IG サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm
OT-30I1600BC	IG サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm
OT-35I1600BC	IG サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm
OT-40I1600BC	IG サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm
OT-45I1600BC	IG サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm
OT-50I1600BC	IG サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm
OT-55I1600BC	IG サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm
OT-60I1600BC	IG サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm
OT-65I1600BC	IG サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39 mm	56.0 - 57.4 mm
OT-70I1600BC	IG サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over



Eruptive Guidance Appliance 萌出誘導用装置

ORTHOtain

医療機器認証番号: 303AKBZX00109000
販売名: オーン テイン
一般的名称: 歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

オクルーズ・オー・ガイド

最大4 mmまでの叢生、最大5 mmまでのスペース閉鎖に対応します。また治療と保定の両方に対応し、多くの症例の治療期間は約4~10か月となります。

(“G” シリーズ)

Hard Type

使用目的: 重度のオーバージェット、重度のオーバーバイト、叢生、スペース閉鎖 TMJに関する問題、一つの装置で治療と保定に対応

13サイズ: 8~12歳用 専用のピンク色のルーラーを使用しサイズを選択します。詳細は裏面をごらんください。

着用方法: 1日1時間の夜間および睡眠中の着用。噛みしめは不要です。




各 ¥7,800 / 個 (税抜)

製品番号	規格	下顎切歯部 (乳歯または永久歯)	上顎切歯部 (乳歯または永久歯)	上顎6前歯部 (永久歯)
OT-10G1200	G サイズ 1	18.9 - 19.6 mm	24.9 - 26.0 mm	39.5 - 40.9 mm
OT-15G1200	G サイズ 1.5	19.7 - 20.4 mm	26.1 - 27.2 mm	41.0 - 42.4 mm
OT-20G1200	G サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm
OT-25G1200	G サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm
OT-30G1200	G サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm
OT-35G1200	G サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm
OT-40G1200	G サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm
OT-45G1200	G サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm
OT-50G1200	G サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm
OT-55G1200	G サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm
OT-60G1200	G サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm
OT-65G1200	G サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39 mm	56.0 - 57.4 mm
OT-70G1200	G サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over

注: 一般に、ほとんどの小児患者は「G」シリーズで終了し、この同じ装置を保定に使用できます。まれに、第2永久大臼歯の過剰萌出により、必要以上に咬合が開く可能性がある場合、「G」をこのシリーズの1つに置き換えて治療を終了し、保持として使用することがあります。

メジャールーラー ピンク

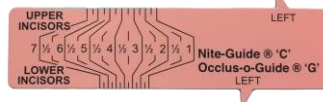

¥2,000 / 10枚入 (税抜)

装置のサイズは左上の余白に刻印されています。上顎歯列用の各装置は1.5 mm間隔で、下顎歯列用の各装置の間隔は0.8 mmです。

5-7歳の患者のための萌出する切歯の誘導用、以下の装置使用します。

ナイトガイド、インテリム・G、オクルーズ・オー・ガイド



ポインターを左下の犬歯近心へ



続いて右下犬歯近心へ

又は



左上犬歯近心から



右上犬歯近心へ

8-12歳の患者用、次の装置使用します。

インテリム・G、オクルーズ・オー・ガイド



左下の側切歯遠心から



続いて右下側切歯遠心へ

又は



左上側切歯遠心から



右上側切歯遠心へ



オーソテイン ポジショナー

目的: オーバーバイト、オーバージェット、ローテーションがすでに確立されている混合歯列期、および思春期の歯列をガイドおよび修正するために使用されます。これらの不正咬合を矯正するには、積極的な噛みしめが必要です。

多くのサイズ: 成人用矯正装置のサイズは、最終的には歯牙のサイズに基づいています。多くのサイズが用意されているので適切なサイズを専用の白いルーラーを使用しサイズを選択します。詳細は次ページをごらんください。

着用方法: オーバーバイト、オーバージェット、および叢生が是正されるまで、少なくとも1日1時間~2時間の噛みしめが必要です。



‘N’ 非抜歯用
‘U’ 上顎小臼歯抜歯用
‘X’ 上下顎小臼歯抜歯用

オーソテイン ポジショナーは成人用の矯正装置、およびフィニッシング用の装置です。成人用の取り外し可能な矯正装置として数十年にわたり臨床で使用され、痛みを伴うオーバーバイト、オーバージェット、TMJなどの問題、またブラケット撤去後の保定装置として活用することができます。

各 ¥7,800 / 個 (税抜)

製品番号	規格	抜歯	上顎6前歯部 (永久歯)
“N”	OT-10N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 1	非抜歯 39.5 - 40.9 mm
	OT-15N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 1.5	非抜歯 41.0 - 42.4 mm
	OT-20N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 2	非抜歯 42.5 - 43.9 mm
	OT-25N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 2.5	非抜歯 44.0 - 45.4 mm
	OT-30N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 3	非抜歯 45.5 - 46.9 mm
	OT-35N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 3.5	非抜歯 47.0 - 48.4 mm
	OT-40N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 4	非抜歯 48.5 - 49.9 mm
	OT-45N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 4.5	非抜歯 50.0 - 51.4 mm
	OT-50N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 5	非抜歯 51.5 - 52.9 mm
	OT-55N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 5.5	非抜歯 53.0 - 54.4 mm
	OT-60N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 6	非抜歯 54.5 - 55.9 mm
	OT-65N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 6.5	非抜歯 56.0 - 57.4 mm
	OT-70N4200NT	NT Non-Ex. サイズ 7	非抜歯 57.5 mm over
	“U”	OT-20U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 2
OT-25U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 2.5	上顎小臼歯 44.0 - 45.4 mm
OT-30U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 3	上顎小臼歯 45.5 - 46.9 mm
OT-35U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 3.5	上顎小臼歯 47.0 - 48.4 mm
OT-40U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 4	上顎小臼歯 48.5 - 49.9 mm
OT-45U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 4.5	上顎小臼歯 50.0 - 51.4 mm
OT-50U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 5	上顎小臼歯 51.5 - 52.9 mm
OT-55U4200UT		UT U bic.-Ex. サイズ 5.5	上顎小臼歯 53.0 - 54.4 mm
“X”	OT-60U4200UT	UT U bic.-Ex. サイズ 6	上顎小臼歯 54.5 mm over
	OT-10X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 1	上下顎小臼歯 45.5 - 46.9 mm
	OT-15X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 1.5	上下顎小臼歯 47.0 - 48.4 mm
	OT-20X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 2	上下顎小臼歯 48.5 - 49.9 mm
	OT-25X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 2.5	上下顎小臼歯 50.0 - 51.4 mm
	OT-30X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 3	上下顎小臼歯 51.5 - 52.9 mm
	OT-35X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 3.5	上下顎小臼歯 53.0 - 54.4 mm
	OT-40X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 4	上下顎小臼歯 54.5 - 55.9 mm
	OT-45X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 4.5	上下顎小臼歯 56.0 - 57.4 mm
	OT-50X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 5	上下顎小臼歯 57.5 - 58.9 mm
OT-55X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 5.5	上下顎小臼歯 59.0 - 60.4 mm	
OT-60X4200XT	XT U/L bic.-EX. サイズ 6	上下顎小臼歯 60.5 mm over	



オーソ テイン ポジショナーによる成人への治療例

犬歯クロスバイト



4ヶ月後



重度のオーバースタイル症例



6ヶ月後



正中離開症例



7ヶ月後



オーソ テイン ポジショナーによるブラケット撤去後の治療例

ブラケット撤去時



装着3週間後



ブラケット撤去時



装着3か月半後



ブラケット撤去時



装着1か月半後



患者の協力度を検出する素材 (C-D®) で製作されたオーソ テイン ポジショナー

夜間のみ装着するとアプライアンスがわずかに半透明になり、毎日2~4時間装着するとほぼ不透明な白色になります。48時間着用しなければ、透明に戻ります。



協力度なし




夜間のみ使用




昼夜適切に使用

オーソ テイン ポジショナー用
メジャールーラー ホワイト

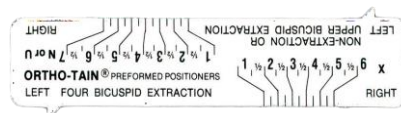

¥2,000 / 10枚入 (税抜)

白いルーラーのポインターを上顎左側犬歯遠心にあて、切縁に沿って上顎右側犬歯遠心まで計測します。矯正用ブラケット撤去後の保定については、最適な結果を得るために、ルーラーに表示されているサイズよりも1サイズ小さい装置を選択してください。

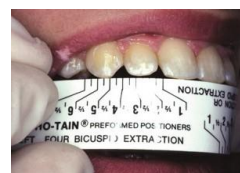



Other goods
関連製品

ORTHOtain

Animal Boxes

アニマル ボックス

オーソ テインの装置が一つずつ入る収納ボックスです。

各 ¥5,500 / 5個入 (税抜)

アソートパック ¥5,500 / 各1個入 (税抜)

製品番号 OT-AB-06

製品番号
OT-AB-01



製品番号
OT-AB-02



Monkey

Car

製品番号
OT-AB-03



Alligator

製品番号
OT-AB-04




Dog

製品番号
OT-AB-05




Cat

フォrestaデント・ジャパンでは定期的にオーソテインに関する矯正歯科セミナーを開催しています。ご興味のある先生は右手のQRコードからご確認ください。

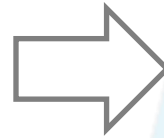

また、メールマガジンでは最新のセミナー情報や、新製品、セールのご案内を発信しています。ご希望の先生はこちらのQRコードから是非ご登録ください！

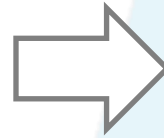

* Facebook* * X Twitter* * Instagram* * LINE*



登録料・使用料は無料です。上記各種QRコードよりご登録いただけます。

製造販売元 **フォrestaデント・ジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>