

オーソ テイン

歯列矯正用咬合誘導装置



セレクトカタログ



Habit Correctors



Class III Corrector



Interim G

ORTHOtain

クラスⅢ コレクター

医療機器認証番号:303AKBZX00109000
販売名:オーソ タイン
一般的名称:歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

◎使用目的

下顎前突の是正に使用します。疑似クラスⅢなどを正常状態に導き、骨格性のクラスⅢを最小限に抑えます。


◎サイズ

Mサイズ(2~6歳用)

Lサイズ(6~12歳用) 6歳臼歯が萌出している場合はLサイズを使用します。

◎使用方法

舌で3つのタブを押し込む運動を行い切歯骨の前方向への発達を促します。1日2時間程度着用します。歯の噛みしめは必要ありません。

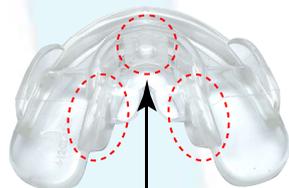


矢印の位置に舌を入れます
すると3つのタブが押され、前方
および側方への成長を促します



下顎のバンパーは厚く作られており、
下顎の成長を抑制します

製品番号	製品名	適応年齢	Height(mm)	Width(mm)	Length(mm)
OT-CLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター Mサイズ	2-6	16.1	55.7	39.3
OT-YCLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター Lサイズ	6-12	16.2	59.7	43.8

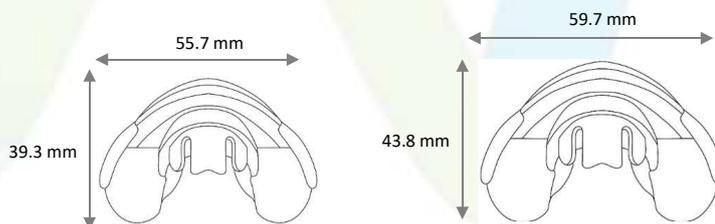

ハビット コレクター

医療機器認証番号:303AKBZX00109000
販売名 オーン デイン
一般的名称:歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

◎使用目的


不適切な習慣(舌癖、指しゃぶり、口呼吸、嚥下異常、発音障害)、軽度の口蓋拡大、歯性開口の是正などに使用します。

◎サイズ


5-8歳用のキッズ+と12歳以上用のアダルト スレンダライズなどがあります。

◎使用方法

日中1~2時間に加え睡眠時に着用します。歯の噛みしめは必要ありません。

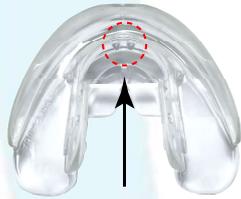

矢印の位置に舌を入れると舌を正しい位置に誘導します
先端には舌突出癖を防止するための突起物があります

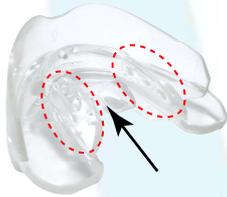


装着することでタブが押され側方への成長を促します



バンパーは高く作られており口呼吸をより防止します

製品番号	製品名	適応年齢	Height(mm)	Width(mm)	Length(mm)
OT-HCCSK40AN	キッズ+	5-8	27.4	57.4	46.3
OT-HCCSA40AN	アダルト スレンダライズ	12以上	30.6	59.8	50.4

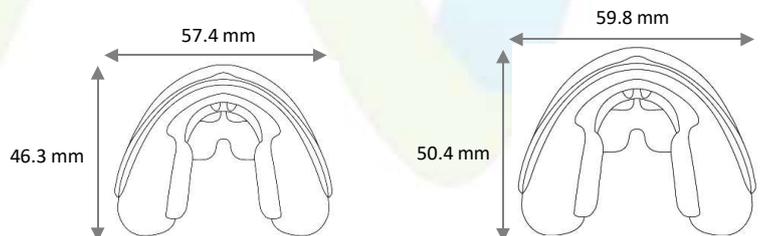

ORTHOtain

インテリム・G (“IG” シリーズ)

医療機器認証番号:303AKBZX00109000
販売名 オーソ テイン
一般的名称:歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

◎使用目的

混合歯列期の叢生や捻転、オーバージェット(出っ歯)、オープンバイト、過蓋咬合などの是正に使用します。

◎サイズ


歯列の大きさに合わせて11サイズからお選びいただけます。
サイズの計測は専用のピンク色のルーラーを使用します。

◎使用方法

1日1時間の着用に加え睡眠中に着用します。歯の噛みしめは必要ありません。

メジャールーラー ピンク

装置のサイズはルーラーの中心部に記載されています。
上顎歯列用の各装置は1.5 mm間隔で、下顎歯列用の各装置の間隔は0.8 mmです。

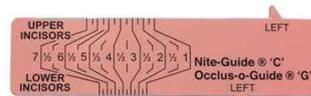

上顎を計測する場合



左上の側切歯遠心にポインターをあて、右上側切歯遠心を計測

下顎を計測する場合



または

左下の側切歯遠心にポインターをあて、右下側切歯遠心を計測

歯型なし



歯型あり



歯型あり

歯型なし

歯型は第一小臼歯までついており、
それ以降はフラットな形状になっています

製品番号	規格	下顎切歯部間の長さ (乳歯または永久歯)	上顎切歯部間の長さ (乳歯または永久歯)	上顎6前歯の長さ (乳歯または永久歯)
OT-2011600BC	サイズ 2	20.5 - 21.1 mm	27.3 - 28.3 mm	42.5 - 43.9 mm
OT-2511600BC	サイズ 2.5	21.2 - 21.9 mm	28.4 - 29.5 mm	44.0 - 45.4 mm
OT-3011600BC	サイズ 3	22.0 - 22.7 mm	29.6 - 30.7 mm	45.5 - 46.9 mm
OT-3511600BC	サイズ 3.5	22.8 - 23.5 mm	30.8 - 31.9 mm	47.0 - 48.4 mm
OT-4011600BC	サイズ 4	23.6 - 24.3 mm	32.0 - 33.1 mm	48.5 - 49.9 mm
OT-4511600BC	サイズ 4.5	24.4 - 25.0 mm	33.2 - 34.2 mm	50.0 - 51.4 mm
OT-5011600BC	サイズ 5	25.1 - 25.8 mm	34.3 - 35.4 mm	51.5 - 52.9 mm
OT-5511600BC	サイズ 5.5	25.9 - 26.6 mm	35.5 - 36.6 mm	53.0 - 54.4 mm
OT-6011600BC	サイズ 6	26.7 - 27.4 mm	36.7 - 37.8 mm	54.5 - 55.9 mm
OT-6511600BC	サイズ 6.5	27.5 - 28.2 mm	37.9 - 39.0 mm	56.0 - 57.4 mm
OT-7011600BC	サイズ 7	28.3 mm over	39.1 mm over	57.5 mm over

※ハードタイプのオクルーズ・オー・ガイドもございます。

より詳しい製品情報を記載した「オーソ テイン総合カタログ」をご用意しております。ご希望の際はお気軽にお問い合わせください！

<お問い合わせ・製造販売元> フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は…… TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>